



PTAバルーンカテーテル

Gokū

ストレートタイプ

 TOKAI MEDICAL PRODUCTS

PTA/バルーンカテーテル

Gokū

ストレートタイプ



Crossability / Safety

先端をテーパー化しガイドワイヤーとの段差を少なくすることで、通過性、追従性を向上させました。
血管壁へのストレスを考慮し、ソフトチップを採用しました。



Trackability

先端から30cmまでのシャフトに親水性コーティングを施し、複雑な血管走行における追従性を向上させております。
(バルーン部分はスリッピング防止のためノンコートです。)

Hi-Pressure

バルーンの材質をポリアミドにすることにより、高耐圧、ノンコンプライアントバルーンを実現しました。
(RBP: 18atm)

Compliance Chart

Pressure	Balloon Size (mm)	
バルーン長 atm / mm	2.0	6.0
4.0	4.0	5.0
6	3.7	4.5
8	3.8	4.7
10	3.9	4.8
12	4.0	5.0
13	4.0	5.0
14	4.0	5.1
15	4.1	5.1
16	4.1	5.2
17	4.1	5.2
18	4.2	5.2
19	4.2	5.3
20	4.2	5.3

Nominal Pressure
Rated Burst Pressure

- 適合ガイドワイヤー：0.018 inch
- 保険請求分類：血管内手術用カテーテル PTA/バルーンカテーテル 一般型・特殊型
- 販売名：VT PTA/バルーンカテーテル
- 承認番号：211008ZZ00509A01
- 一般的名称：バルーン拡張式血管形成用カテーテル
- JMDNコード：17184014
- クラス分類：クラスIV 高度管理医療機器

Gokū PTA Balloon Dilatation Catheter

カタログ番号	バルーン 径 (mm)	バルーン 長 (cm)	バルーン 形状	有効長 (cm)	適合 サイズ (Fr.)	ノミナル (atm)	RBP (atm)	JANコード
S44027	4.0	2.0	ストレート	70	4	13	18	4580137870739
S45027	5.0							4580137871941
S46027	6.0							4580137871989

製造販売業者


**株式会社
東海メディカルプロダクツ**

本社/〒486-0808 愛知県春日井市田染町字更屋敷1485番地

お客様問合せ窓口

TEL 0568-54-7661 FAX 0568-87-0058

代表

TEL 0568-81-7954 FAX 0568-81-7785

販売業者