



PTAバルーンカテーテル

Gokū

カーブタイプ

 TOKAI MEDICAL PRODUCTS

PTAバルーンカテーテル

Gokū

カーブタイプ



Crossability / Safety

先端をテーパーにすることにより、ガイドワイヤーとの段差を少なくし、通過性、追従性を向上させ、ソフトチップにすることにより、血管壁への損傷を低減させます。



Trackability

先端から30cmまでのシャフトに親水性コーティングを施し、複雑な血管走行における、追従性を向上させております。(バルーン部分はスリッピング防止のためノンコートです。)

Hi-Pressure

バルーンの材質をポリアミドにすることにより、高耐圧、ノンコンプライアントバルーンを実現しました。

Curve Type

拡張時にバルーン自体が曲がるため、高度の屈曲病変に優れたコンフォーマビリティを發揮します。拡張時に血管を直線化しないため、血管へのストレスを低減します。高度の屈曲病変に対して、バルーン拡張時の折れを無くします。

Compliance Chart

Pressure	Balloon Size (mm)		
バルーン径	20		
atm / mm	4.0	5.0	6.0
6	3.7	4.5	5.4
8	3.8	4.7	5.6
10	3.9	4.8	5.8
12	4.0	5.0	5.9
13	4.0	5.0	6.0
14	4.0	5.1	6.1
15	4.1	5.1	6.1
16	4.1	5.2	6.2
17	4.1	5.2	6.2
18	4.2	5.2	6.2
19	4.2	5.3	6.3
20	4.2	5.3	6.3

■ Nominal Pressure ■ Rated Burst Pressure

■ 加圧時における屈曲状況

加圧 (atm)	屈曲角度	加圧 (atm)	屈曲角度
10	90°	15	85°
13	88°	18	80°



加圧10atm時の屈曲状況

Gokū PTA Balloon Dilatation Catheter

カタログ番号	バルーン径 (mm)	バルーン径 (cm)	バルーン形状	有効長 (cm)	適合サイズ (Fr)	ノミナル (atm)	RBP (atm)	JANコード
C44027	4.0							4580137871996
C45027	5.0	2.0	カーブ	70	4	13	18	4580137872030
C46027	6.0							4580137872078

- 適合ガイドワイヤー：0.018 Inch
- 保険請求分類：血管内手術用カテーテル PTA/バルーンカテーテル 一般型・特殊型
- 販売名：VT PTA/バルーンカテーテル
- 承認番号：211008Z200509A01
- 一般的名称：バルーン拡張式血管形成用カテーテル
- JMDNコード：17184014
- クラス分類：クラスIV 高度管理医療機器

製造販売業者

株式会社 東海メディカルプロダクツ

本社 / 〒486-0808 愛知県春日井市田楽町字更座敷1485番地

お客様問合せ窓口
TEL 0568-54-7661 FAX 0568-87-0058

代表
TEL 0568-81-7954 FAX 0568-81-7785

販売業者