

〈取扱説明書〉

バルーンコンプライアンスチャート



| カテーテル 外径 (Fr) | 注入容量 | | | | | | | | | |
|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 0.1mL | 0.2mL | 0.3mL | 0.4mL | 0.5mL | 0.6mL | 0.7mL | 0.8mL | 0.9mL | 1.0mL |
| 6Fr | 3.8mm | 5.9mm | 7.2mm | 8.2mm | 9.1mm | 9.9mm | — | — | — | — |
| 7Fr | 4.7mm | 6.5mm | 7.7mm | 8.4mm | 9.2mm | 9.8mm | 10.3mm | 10.8mm | 11.3mm | 11.9mm |
| 8Fr | 5.0mm | 6.7mm | 7.8mm | 8.7mm | 9.4mm | 10.0mm | 10.5mm | 10.9mm | 11.4mm | 12.0mm |
| 9Fr | 6.1mm | 7.6mm | 8.5mm | 9.3mm | 9.9mm | 10.5mm | 11.0mm | 11.5mm | 11.9mm | — |

※本値はin vitroでの参考値です

※臨床では、透視下で十分にバルーンの拡張状態を確認の上、ご使用下さい

バルーン最大拡張径

製造販売業者  TOKAI MEDICAL PRODUCTS

販売名 TMPオクリュージョン / オプティモテンポラリーオクリュージョンバルーン

2023年4月 第2版