

Peripheral

シースレスガイドとフローコントロールにより末梢血管内治療をサポート

BG | CATHETER

OPTIMO[®] PPI

SHEATHLESS KIT



より低侵襲なペリフェラル領域治療のために、OPTIMOをシースレス仕様にデザインしました。
太径の血管にも対応できるように、最大径15mmのオクリュージョンバルーンを搭載しました。
専用ダイレータを同梱し、準備の手間が少なくなりました。

■仕様


製品番号	カテーテル外径 (mm)	カテーテル内腔 (inch)	有効長 (cm)	先端形状	JANコード
BGS87Q	2.77	0.087	25	ストレート	4562382435840
BGS87HX	2.77	0.087	50	ストレート	4562382438070

■コンプライアンスチャート

液体注入量(mL)	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.5
拡張径(mm)	6.0	7.9	9.0	10.1	11.0	11.7	12.4	13.0	13.8	14.0	14.5	14.9	15.0

バルーン最大拡張径(この径を超える拡張はお控えください)

注1) このデータは、エア抜きを実施し、デッドスペースを液体で充填した状態でのものとなります。
注2) この数値はin vitroでの参考数値となります。
注3) 臨床上では透視下で十分にバルーンの拡張状態を確認の上、ご使用ください。

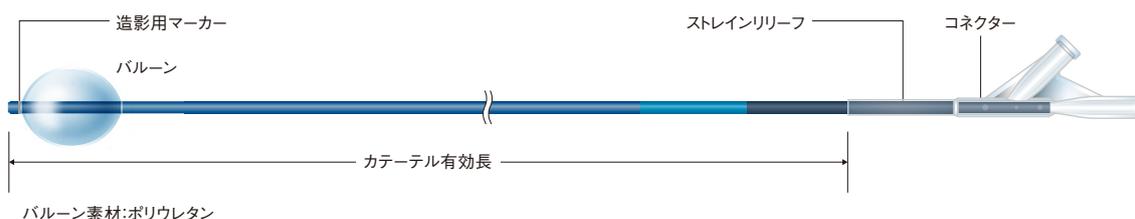

- 販売名: オプティモPPI
- 承認番号: 22900BZX00391000
- 一般的名称: 中心循環系ガイディング用血管内カテーテル(中心循環系閉塞術用血管内カテーテル)
- クラス分類: 高度管理医療機器 クラスIV
- 再使用禁止
- 保険請求分類: 血管内手術用カテーテル/オクリュージョンカテーテル/特殊型

改良等の理由により、仕様の一部を予告なく変更する場合があります。本製品を使用するには、必ず添付文書をお読みください。

製造販売業者



本社 / 〒486-0808 愛知県春日井市田楽町字更屋敷1485番地

- お客様問合せ窓口 TEL 0568-54-7661 FAX 0568-87-0058
- 代表 TEL 0568-81-7954 FAX 0568-81-7785
- URL <http://www.tokaimedpro.co.jp/>
- E-mail info@tokaimedpro.co.jp

販売業者