


■ 同梱内容

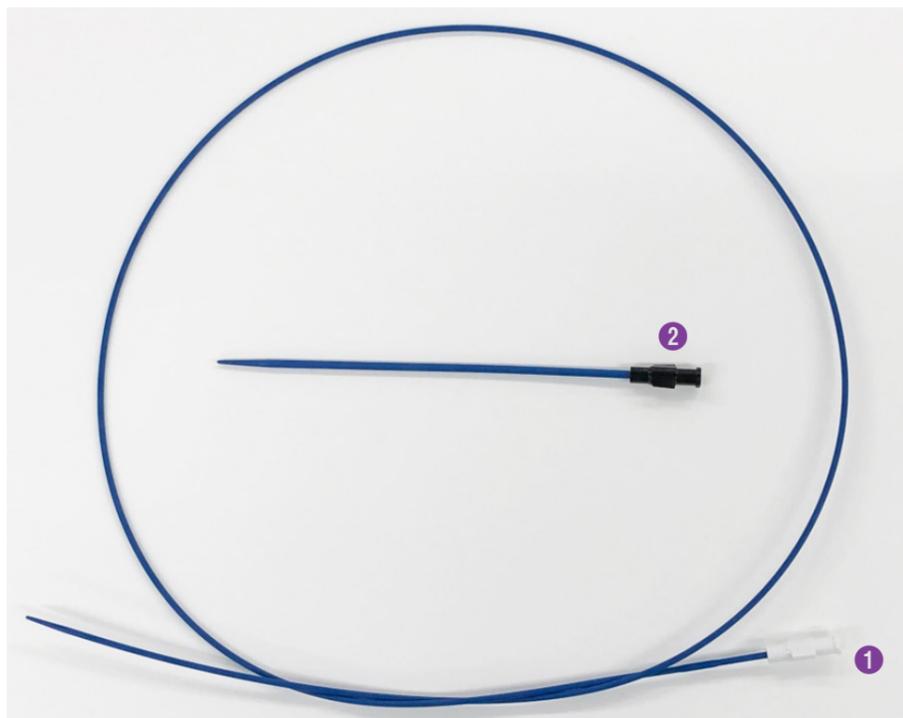

①ダイレーター ②プレダイレーター

■ 製品仕様

カタログ番号	外径	有効長	適合ガイドワイヤー径	入り数	JANコード
DL887A	2.16mm	107.8cm	0.035inch	5	4580737310574
DL993A	2.31mm				4580737310581

- 販売名:TMPダイレーター-I
- 承認番号:302AFBZX00032000
- 一般的名称:カテーテル拡張器
- クラス分類:管理医療機器クラスII
- 再使用禁止
- 保険請求分類:ダイレーター

改良等の理由により、仕様の一部を予告なく変更する場合があります。本製品を使用する際には、必ず添付文書をお読みください。

製造販売業者



株式会社 東海メディカルプロダクツ

本社 / 〒486-0808 愛知県春日井市田楽町字更屋敷1485番地

お客様問合せ窓口 TEL 0568-54-7661 FAX 0568-87-0058

代表 TEL 0568-81-7954 FAX 0568-81-7785

URL <http://www.tokaimedpro.co.jp/>

E-mail [info@tokaimedpro.co.jp](mailto:info@tokaimedpro.co.jp)

販売業者

オプティモのシースレス挿入でさらなる低侵襲治療へアクセス

# TMPダイレーター-I

For OPTIMO<sup>EPD</sup>




# TMPダイレーター-I


## For OPTIMO<sup>EPD</sup>



### OPTIMO<sup>EPD</sup>+スマートコネクタNVに合わせたダイレーター

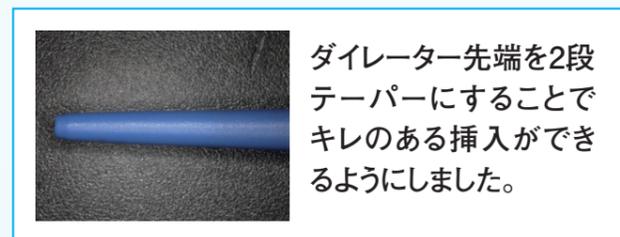

ダイレーター先端を2段テーパにする事で、キレのある挿入ができるようになりました。

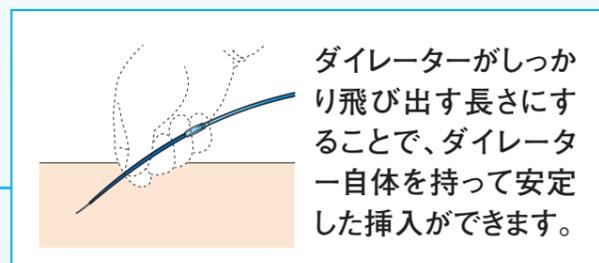

ダイレーターがしっかり飛び出す長さにする事で、ダイレーター自体を持って安定した挿入ができます。

OPTIMO<sup>EPD</sup> 8Fr./9Fr. 仕様の内腔に合わせた外径にしました。

OPTIMO<sup>EPD</sup>+スマートコネクタNVの組み合わせで使用できる長さにしました。

### プレダイレーター付属

シースレス挿入用のプレダイレーターを付属しております。外径はOPTIMO<sup>EPD</sup>の外径と同じです。




## TMPダイレーター-Iを用いたシースレス挿入手順

OPTIMO EPD に付属するスマートコネクタNVを用いてご使用ください。


挿入手順

1

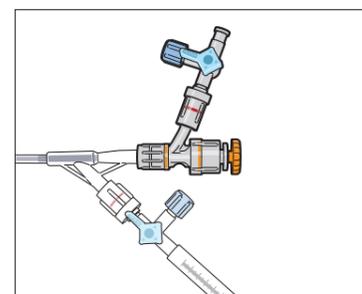


1 エア抜きしたカテーテルにスマートコネクタNVと三方活栓を取り付ける。

2

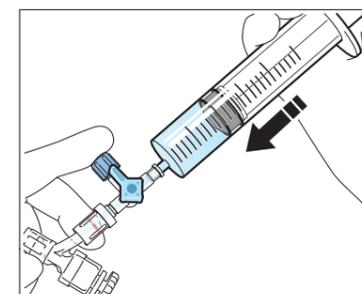


2 スマートコネクタNVサイドポートからヘパリン加生理食塩水を注入、システム内腔のエアを除去する。

3

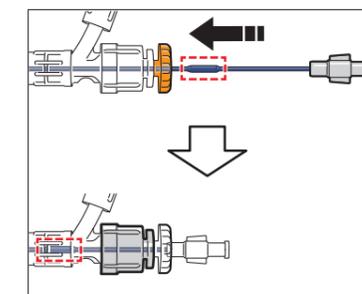


3 ダイレーターをスマートコネクタNV内に、突き当たるまで挿入する。

4

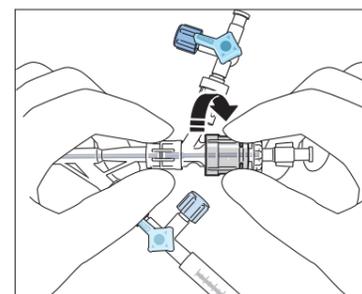


4 スマートコネクタNVのバルブをしっかり閉め、ダイレーターをロックする。

5

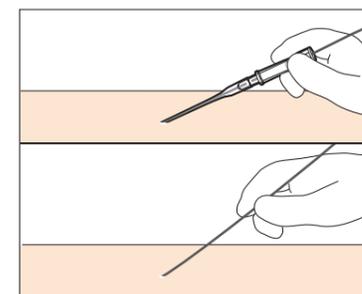


5 セルジガー法により0.035inchガイドワイヤーを留置する。(ガイドワイヤーは同梱されておりません。別途ご用意ください。)

6

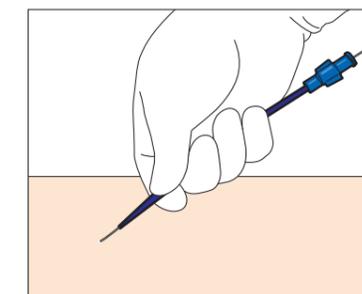


6 ガイドワイヤーに沿わせ、プレダイレーターを穿刺部に挿入・抜去する。

7

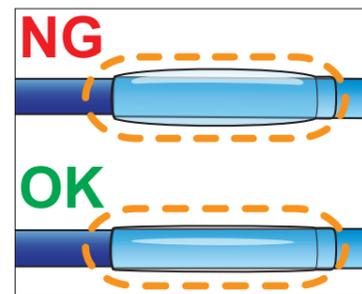


7 カテーテルのバルーンが完全に収縮していることを確認する。収縮していなければ陰圧を掛け、完全に収縮させる。

8

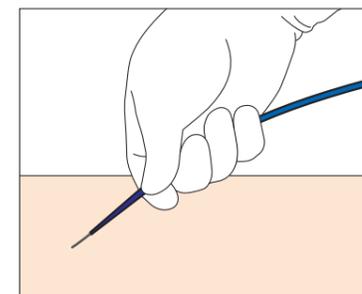

8 ガイドワイヤーに沿わせ、ダイレーター及びカテーテルシステムを穿刺部に挿入する。

9

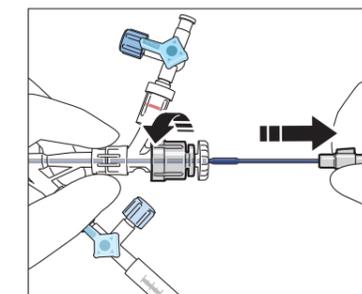

9 スマートコネクタNVのバルブを少し緩め、ダイレーターを抜去する。