



TMPスマートコネクタ® トライ

**smart
connector** *tri*




**Smooth
Side Branch**

プッシュ式トリプルコネクタ

製品特徴

軟質パッドを内蔵

サイドブランチの合流部に
 “軟質パッド”を内蔵すること
 で、サイドブランチへのカテ
 テル挿通がスムーズに

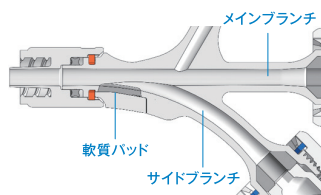

※全長90mm

カラフルオープナー

メインブランチとサイドブランチ
 の色を変え、手技中の認識性を
 サポート


延長チューブ付属



※長さ220mm


オープナーの使い方

オープナーを押すことで止血バルブが開きます。また、押し込みながら時計方向に回すことで止血バルブを開いた状態でロックが可能です。

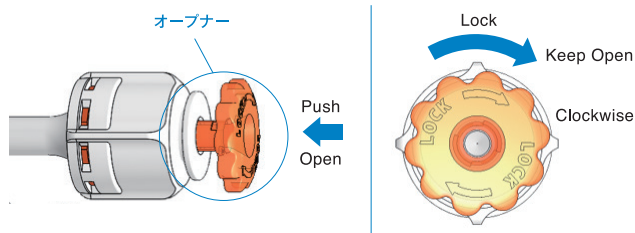

スクリーキャップの使い方

造影する時や、“カテーテルをしっかりホールド”したい時、“スクリーキャップ”も使用可能です。スクリーキャップを時計方向に回すことにより固定バルブが少しずつ閉じていきます。

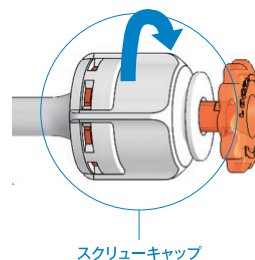

製品番号	全長	対応デバイス	最大耐圧	JANコード	入り数
YN16TRE	90mm	8Fr	400psi (固定バルブが閉じた状態)	14580737311547	5

□販売名:TMP Yコネクター II
 □一般的名称:バルーン拡張式血管形成術向けカテーテル用コネクタ
 □再使用禁止

□承認番号:30400BZX00258A01
 □管理医療機器

改良等の理由により、仕様の一部を予告なく変更する場合があります。
 本製品を使用する際には、必ず添付文書をお読みください。

製造販売業者



本社 / 〒486-0808 愛知県春日井市田楽町字更屋敷1485番地

TEL 0568-54-7661 FAX 0568-87-0058

代表 TEL 0568-81-7954 FAX 0568-81-7785

URL <https://www.tokaimedpro.co.jp/>

E-mail info@tokaimedpro.co.jp

販売業者